

## 사용방법

### 1. 사용방법

1) 유도 카테터를 포장에서 꺼냅니다.

2) 포장에서 꺼낸 유도 카테터에 손상된 부분이 없는지 확인합니다.

경고: 손상된 유도 카테터는 어떠한 방식으로도 절대 사용하지 마십시오. 손상된 유도 카테터는 손상되지 않은 유도 카테터로 교체합니다.

3) 사용하기 전에 헤파린이 첨가된 멸균 식염수로 유도 카테터 관내를 세척하십시오.

4) 피부 삽입 기법을 사용하여 카테터 삽입기 및/또는 내재 가이드와이어를 통해 혈관 내에 유도 카테터를 삽입하십시오.

5) 유도 카테터 허브에 연결된 지혈 밸브의 측면을 따라 헤파린이 첨가된 멸균 식염수를 계속 주입하십시오.

참고: 유도 카테터와 이 카테터를 통과하는 내관 장치 사이에 헤파린이 첨가된 멸균 식염수를 계속해서 주입하는 것이 좋습니다.

6) 투시 유도 하에 유도 카테터가 원하는 위치에 도달할 때까지 가이드와이어 또는 삽입기를 통해 삽입하십시오.

7) 가이드와이어 또는 삽입기를 제거한 다음 혈관 내 장치를 삽입하거나 조영제를 주사하십시오.

본 문서는 열람용으로써, 무단 복제와 배포를 금지함

## 사용시 주의사항

### 1. 사용시 주의사항

- 1) 직사광선을 피해 건조하고 서늘한 곳에 보관하십시오.
- 2) 포장이 뜯어져 있거나 손상된 제품은 사용하지 마십시오.
- 3) '사용 기한'이 지난 제품은 사용하지 마십시오.
- 4) 다시 멸균하지 마십시오.
- 5) 유기 용매에 노출시키지 마십시오.
- 6) 사용 전에 반드시 유도 카테터의 크기, 모양, 상태 등을 세심하게 점검하여 시술 절차에 적합한지 확인하십시오.
- 7) 조작 중에 저항이 느껴지며 시술을 중단하고 저항의 원인을 파악한 후 계속 진행하십시오. 저항의 원인이 확인되지 않는 경우에는 카테터를 빼내십시오.
- 8) 유도 카테터가 꼬인 상태에서 과도한 회전력을 받으면 카테터가 손상되어 카테터 샤프트가 분리될 수도 있습니다. 유도 카테터 샤프트가 심하게 꼬여있는 경우에는 전체 시스템(유도 카테터, 가이드와이어, CSI(카테터 삽입기))를 빼내십시오.
- 9) 유도 카테터를 삽입하고 조작하고 빼낼 때에는 반드시 투시 유도하에서 수행해야 합니다.
- 10) 유도 카테터가 통과하는 혈관이 손상되지 않도록 세심한 주의를 기울여야 합니다. 유도 카테터의 직경보다 좁은 혈관에 삽입할 경우 혈관이 막힐 수도 있습니다. 혈액의 흐름이 완전히 차단되는 경우가 발생하지 않도록 주의하십시오.
- 11) 내부 관이 넓은 유도 카테터는 삽입 시 주사기에 힘을 덜 주어야 합니다.

### 2. 합병증

발생 가능한 합병증에 대해 잘 모르는 의사가 피부를 통해 카테터를 삽입해야 하는 시술은 시도해서는 안됩니다. 합병증은 시술 도중 또는 이후에 언제든지 발생할 수 있습니다.

다음과 같은 합병증이 발생할 수 있으며 이 밖의 다른 합병증도 발생할 수 있습니다.  
 공기색전증, 천자 부위의 혈종, 감염, 심장 또는 혈관벽 천공

저장방법 : 실온보관

본 문서는 열람용으로서, 무단 복제와 도용을 금지함